

暖洋洋日用品有限公司

Warmer Commodity Co.,Ltd

厂址：山东省乳山市广州路 56 号；办公地址：青岛市崂山区青岛数码科技中心 B-1819

Tel:0532-55579692 Fax:0532-55579693 www.oemwarmer.com

暖贴原理及保健效用

一、产品材质：

该产品为片状贴剂，是由原料层、明胶层、无纺布袋三部分组成的，尺寸：约 13×10cm，原料层置于无纺布袋内，明胶层用于使一贴热粘附在衣服上。原料层是由铁、石、活性炭、无机盐、水等合成的聚合物，无毒、无副作用，可在空气中氧气的作用下发生放热反应。无纺布袋的特点是均匀不漏、透气性好。明胶层选用日本特有的优质压敏胶涂层，粘结牢固，绝不污损衣物。

二、作用原理：

暖身贴中的原料层可以在空气中氧气的作用下 12 小时内持续不断地释放热量，这种反应过程是从一打开塑料包装的时候开始的。

三、产品特点：

一贴即热，快速热敷、消肿、止痛、活血化瘀，广泛适用于各种畏寒症。1、快速缓解并消除各种畏寒疾病引起的疼痛，是关节炎、肩周炎、腰腿痛、风湿及类风湿、四肢发凉、患处遇寒疼痛等疾病患者迅速止痛的即开即用型产品。2、驱寒保暖，促进人体微循环，对手、脚冻伤、骨伤、肌肉损伤等症状具有良好的消肿止痛功能。3、促进经络畅通，热敷相关穴位，消除胃寒不适、经血不通等症状，具有活血化瘀的作用。4、冬季替代厚重的棉衣，为人体提供温度保障。

四、使用方法：

该产品轻薄，柔软而富有弹性。可贴于人体的肩部、背部、腰部、胃部及相关关节部位；使用时只须往相应部位一贴，立刻就能发热，温度最高强 62，平均 52。持续时间在 12 小时，对腰，肩，胃，腿及关节等疼痛均有缓解作用，在寒冷的冬季外出防止冬伤驱寒有很好的效果，携带方便，发热持久稳定。

(1) 使用之前将真空包装外袋撕开。

(2) 撕开外袋，取出内袋，不需揉搓，将剥离后面的衬纸，贴在内衣外层，用手铺平即可。

(3) 使用完后，从衣服上轻轻撕下即可。

五、注意事项：

1、暖身贴使用时要贴于内衣的外侧，不宜直接贴于人体皮肤上。

2、暖身贴的最高发热温度为 62℃，可持续 12 小时均匀放热，晚上睡觉时不宜用。

3、请妥善保管产品，避免使暖身贴的塑料包装袋破坏，造成原料泄露。

六、保存方法：

产品置于干燥、避光处保存，保质期为三年（保质期过后同样可以使用，但是温度的稳定性会较差）